

## GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DIE AUGENDUSCHE

**ANWENDUNGEN:**

Wundspülung, mechanische Augenspülung, Spülung und Reinigung der Mundhöhle, Reinigung und Spülung von Instrumenten und chirurgischen Geräten, postoperative Spülung.

**GEBRAUCHSANWEISUNG:**

1. Setzen Sie den Augentrichter auf die Flasche
2. Drehen Sie 180°, um die Kunststoffkappe zu lösen.
3. den Trichter auf das betroffene Auge aufsetzen
4. Druck auf die Flasche ausüben und spülen, bis sie leer ist

**LAGERUNG:**

In der Originalverpackung, ungeöffnet und unbeschädigt, an einem trockenen Ort bei einer Temperatur von 5 - 25°C aufbewahren.

Material und Kunststoffverpackungen, indem das Produkt nicht dem Sonnenlicht oder UV-Licht aussetzen.