

256052 - 256053

1. Setzen Sie den Deckel auf, bevor Sie die Box benutzen.



2. Wenn der Behälter zu 80 % gefüllt ist, drücken Sie die Sicherheitskappe nach unten. Zwei Stellungen des Deckels - Standby und Finalstellung.



Kerben in der Kappe dienen dazu, gebrauchte Nadeln zu entfernen, ohne die menschliche Hand zu berühren.

Zulässige Füllmasse bestimmt									
<b>4L</b>	2,4Kg	<b>5L</b>	3Kg	<b>6L</b>	3,6Kg	<b>8L</b>	4,8Kg	<b>10L</b>	5,4Kg

Die Boxen können mit Abfällen, einschließlich flüssiger Rückstände, gefüllt werden. Der Gesamtflüssigkeitsgehalt der Abfälle darf 5 % des zulässigen Füllgewichts nicht überschreiten. Wird dieser Grenzwert überschritten, muss dem Abfall stets eine ausreichende Menge an Absorptionsmittel zugefügt werden. Die Boxen garantieren keine langfristige absolute Dichtheit. Vor der Entsorgung in der Füllposition belassen. Mechanische Beschädigungen und Verformungen des Behälters selbst durch unsachgemäße Handhabung dürfen nicht auftreten.